



HOVERSLING®

Split-Leg



HOVERSLING®

Repositioning Sheet

Brugervejledning




Besøg www.HoverTechInternational.com for andre spørgsmål

INDHOLDSFORTEGNELSE

Symbolreference	2
Tilsligtet anvendelse og forsigtighedsregler	3
Emneidentifikation – HoverSling® Split-Leg	4
Produktspecifikationer til HoverSling® Split-Leg/påkrævet tilbehør	4
Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som flyttemadras	5
Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som slynge	5-6
Emneidentifikation – HoverSling® Repositioning Sheet	7
Produktspecifikationer for HoverSling® Repositioning Sheet/påkrævet tilbehør	7
Påsætning af HoverSling® Repositioning Sheet hægte-slyngeremme	8
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som flyttemadras	8
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som slynge	8-9
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt til siddende flytninger	10
Emneidentifikation – HT-Air® 1200-luftforsyning	11
HT-Air® 1200-luftforsyningstastaturfunktioner	11
Rengøring, forebyggende vedligeholdelse/infektionsbekæmpelse	12
Returnering og reparation	13

Symbolreference

	CE-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		PARTINUMMER
	UK-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		PRODUCENT
	AUTORISERET REPRÆSENTANT		FREMSTILLINGSDATO
	ANSVARLIG PERSON I STORBRITANNIEN		MEDICINSK ENHED
	AUTORISERET REPRÆSENTANT I SCHWEIZ		MR-BETINGET
	FORSIGTIG/ADVARSEL		MR-USIKKER
	IMPORTØR		ENKELT PATIENT – ANVENDES FLERE GANGE
	BORTSKAFFELSE		MÅ IKKE VASKES
	BETJENINGSVEJLEDNING		ENTYDIG ENHEDSIDENTIFIKATOR
	BRUG TO PLEJERE		GRÆNSE FOR PATIENTVÆGT
	LÅS ALLE HJUL		HOLD DIG I NÆRHEDEN-TILGANG
	SØRG FOR, AT PATIENTEN LIGGER FLADT		LUK LUFTEN UD, SÆNK SENGEHESTENE
	CENTRÉR PATIENTEN		STROPLIGNENDE BØJLE
	SPÆND PATIENTREMMEN		SÆT FORBINDELSESREM PÅ
	LATEXFRI		FODENDE



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette produkt overholder kravene i forordning om medicinsk udstyr (2017/745).
Desuden overholder dette produkt kravene i: ISO 10535

Tilsigtet anvendelse og forsigtighedsregler

TILSIGTET ANVENDELSE

HoverSling® Split-Leg og HoverSling® Repositioning Sheet er en kombination af luftassisterede flyttemadrasser og løfteslynger. Under anvendelsen som en luftunderstøttet madras, puster HoverTech-luftforsyningen HoverSling op til at beskytte og holde patienten, mens luft samtidig siver ud af huller på undersiden, hvilket nedsætter kraften, der skal bruges til at flytte patienten, med 80-90 %. I denne funktion kan HoverSling bruges til at hjælpe plejere med laterale patientflytninger, placering (herunder løft og vending), og at nedlægning. HoverSling kan også bruges uoppustet til vertikale patientløft, vending og nedlægning med en stroplignende bøjle.

INDIKATIONER

- Patienter, der ikke kan hjælpe med deres egen flytning til siden eller lodret.
- Patienter, hvis vægt eller livvidde udfører en mulig sundhedsrisiko for plejerne, der er ansvarlige for at ændre placering eller flytte disse patienter lodret eller til siden.

KONTRAINDIKATIONER

- Patienter, som oplever bryst-, hals- eller lændefrakturet, som skønnes at være ustabile, bør ikke bruge HoverSling, med mindre der er truffet en klinisk beslutning af hospitalet.

TILSIGTEDE BEHANDLINGSMILJØER

- Hospitaler, langtidshospitaler eller faciliteter til forlænget behandling

FORHOLDSREGLER - VED BRUG SOM EN LUFTUNDERSTØTTET FLYTTEMADRAS

- Plejere skal bekræfte, at alle bremser er aktiverede før flytningen.
- Brug mindst to plejere under luftassisterede patientflytninger til siden.
- For i-sengen luftassisterede placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig. Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.
- Se HoverTechs video på www HoverTechInternational.com for luftassisteret nedlægning.
- Lad aldrig en patient være uden opsyn på en oppustet HoverSling.
- Anvend kun dette produkt til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
- Brug kun påsætninger og/eller tilbehør, der er godkendt af HoverTech.
- Når en patient flyttes til en seng med lavt lufttab, skal sengemadrassens luftstrøm indstilles til det højeste niveau, for at give et fast flytteleje.
- Forsøg aldrig at flytte en patient lateralt på en HoverSling, der ikke er oppustet.
- Sørg for, at patienten er centreret på HoverSling, før den oppustes.

FORSIGTIGHEDSREGLER – LUFTFORSYNING

- Før strømlinjen på en måde, der sikrer frihed for fare. Undgå blokering af luftindtag på luftforsyningen.
- Når HoverSling anvendes i et MR-miljø, er en særlig MR-slange på 7,62 meter (25 fod) påkrævet (kan købes).
- **FORSIGTIG:** Undgå elektrisk stød. Åbn ikke luftforsyningen.
- Læs de produktspecifikke brugsanvisninger angående betjeningsvejledninger.

FORSIGTIGHEDSREGLER – TIL BRUG SOM EN SLYNGE

- For laterale patientflytninger kan mere end en plejer være nødvendig.
- For i-sengen placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig. Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.
- Se HoverTechs træningsvideo på www HoverTechInternational.com for nedlægning.
- HoverSling må kun anvendes af uddannet personale.
- Brug kun påsætninger og/eller tilbehør, der er godkendt af HoverTech.
- Før brug skal en risikovurdering gøres for at sikre, at den korrekte størrelse HoverSling bruges til patienten.
- En klinisk vurdering skal udføres af en kvalificeret sygeplejerske eller læge inden patienter løftes med HoverSling.
- Brug ikke HoverSling Split-Leg sideflyttehåndtag til at løfte. Overdreven belastning på sideflyttehåndtagene kan forårsage at HoverSling revner.
- Sørg for, at HoverSling ikke er påsat nogen genstande udover den stroplignende bøjle.
- Når den stroplignende bøjle forbindes, sørg for at skulderremmenes stropfarver matcher på patientens venstre og højre side, og benremmenes stropfarver på patientens venstre og højre side.
- Når slyngens hjælperemme er helt udstrakte, sørg for at de er ordentligt fastgjorte til bøjlen, før patienten løftes.
- Ved siddende løft, sørg for at patienten sidder sikkert i HoverSling® før der flyttes eller løftes.
- Løft aldrig en patient højere end nødvendigt til at udføre løftet/flytningen.
- Lad aldrig patienten være uden opsyn, når HoverSling anvendes.
- Anvend HoverSling i overensstemmelse med både løfteanvisningerne og HoverSling's brugervejledning.
- Hvis vægtgrænsen afviger mellem patientløfter, bøjle og HoverSling, så er det den laveste vægtgrænse, der gælder.



Hvis der er nogen tegn på skader, skal HoverSling tages ud af brug og bortskaffes.



Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.




På operationsstuen – for at forhindre, at patienten glider, skal luften altid lukkes ud af HoverSling, og patienten og HoverSling skal fastgøres til operationsbordet, før bordet flyttes i vinkelstilling.

FORHOLDSREGLER – MR

- HoverSling Split-Leg og HoverSling Repositioning Sheet er MR-betingede af grundelse. Enhederne er fremstillet af helt ikke-jernholdige materialer. Som følge deraf blev MR-sikkerhedstestning ikke udført. Baseret på grundelse er HoverSling Split-Leg og HoverSling® Repositioning Sheet elektronisk set ikke-ledende og ikke-magnetiske.
- Når der anvendes HoverSling Split-Leg og HoverSling Repositioning Sheet in i et MR-miljø, er en særlig MR-slange på 7,62 meter påkrævet, som således gør disse produkter MR-betingede. HoverTechs luftforsyning og almindelige slange er ledende og magnetiske og er MR-usikre.

Emneidentifikation – HoverSling® Split-Leg

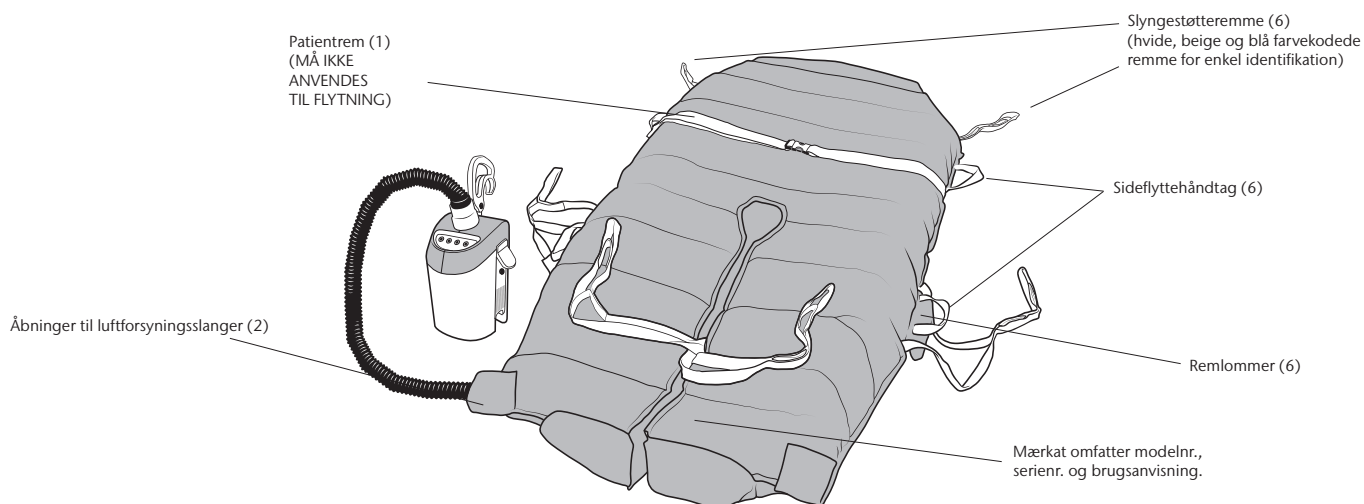

Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør

HOVERSLING® SPLIT-LEG

Materiale:	Overdel: Polyesterstrikk Underdel: Nylontwill
Udformning:	Syet
Bredde:	34" (86 cm)
Længde:	70" (178 cm)

Modelnr.: HMSLING-34-B* – 34" W x 70" L (10 pr. kasse)



VÆGTGRÆNSE 318 KG / 700 LBS

*Åndbar model



PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN FLYTTEMADRAS:

Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modelnr.: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN SLYNGE:

Et patientløft med 2-, 3- eller 4-punkts stroplignende bøjler beregnet til brug med:

- Mobile hejser med slyngesæder
- Hejsevogne
- Stationære hejser fastgjort til væggen/væggene, gulvet og/eller loftet
- Stationære fritstående hejser


Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som flyttemadras

1. Sørg for at slyngestøtteremmen opbevares i remlommerne, og at de fire (4) spænder, placeret på de centrale ben og fod-sektioner er forbundne.
2. Patienten skal helst ligge på ryggen.
3. Placer HoverSling Split-Leg under patienten ved hjælp af rulleteknik og spænd patientsikkerhedsremmene løst.
4. Sæt HoverTech-luftforsyningens ledning i stikkontakt.
5. Sæt slangedysen i en af de to slangeindgange i fodenden af HoverSling Split-Leg og skub den på plads.
6. Sørg for, at flyttelejerne er så tætte på hinanden som muligt, og lås alle hjul.
7. Hvis det er muligt, flyt fra et højere leje til et lavere leje.
8. Tænd for HoverTech-luftforsyningen.
9. Skub den oppustede HoverSling Split-Leg i en vinkel, enten hoved først eller fødder først. Når der nås halvvejs, skal den modsatte plejer tage fat i de nærmeste håndtag og trække den i den ønskede position.
10. Sørg for, at patienten er på modtagerudstyret før luften lukkes ud.
11. Sluk for luftforsyningen, og løft sengens/bårens sengeheste. Spænd patientremmen op.

Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som slynge

BRUGSANVISNING - PATIENT I SENG

Bemærk: HoverSling Split-Leg har seks (6) slyngestøtteremme, som skal være forbundne.

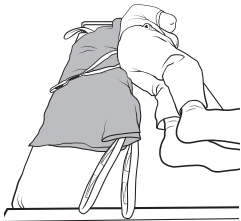


1. **Mulighed 1** – Placer HoverSling Split-Leg under patienten ved hjælp af rulleteknik med spidsen af slyngens hestesko ved patientens haleben. Løft sengens hovedgærde.


Mulighed 2 – Løft sengens hovedgærde. Læn patienten fremad og glid slyngen bagom patientens ryg, indtil spidsen af hesteskoen når patientens haleben. Få patienten til at læne sig tilbage for at holde slyngen på plads.



3. Åbn de indvendige båndspænder. Kryds indvendige benstøtteremme ved at tage en benstøtterem og føre den over til den anden, på den anden side. Forbind indvendige benstøtter til bøjlens.

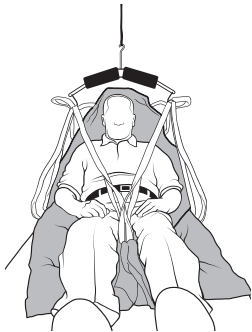


2. Fastgør skulderremmene til bøjlens for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche replacering på venstre og højre side af patienten. Kortere remstropper ved skulderen (blå/beige) medfører en mere opret siddestilling, mens længere skulder- og benremme (hvide) øger tilbagelænvinklen og reducerer hoftens bøjning].

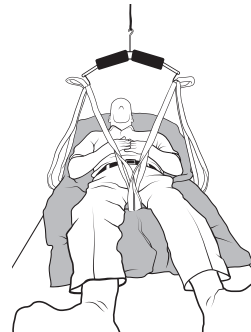

4. Forbind udvendige benstøtteremme til bøjlens. Flyt patienten.

BEMÆRK: Når patienten flyttes til en stol, skal du læne stolen tilbage og hæve fodstøtten (hvis det er muligt).


BRUGSANVISNING - TILBAGE I SENG

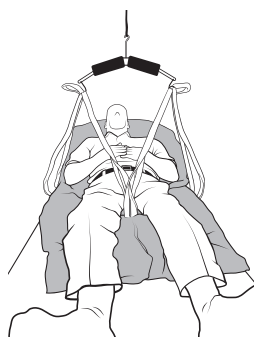

1. Placer patienten over midten af sengen.
Løft hovedgærdet og sænk patienten ned på sengen.




2. Fjern remstropperne fra bøjlen.

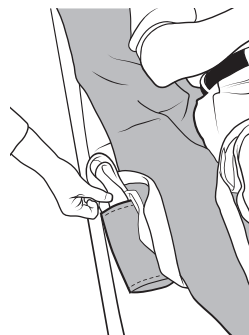


3. Læg slyngestøtteremmen tilbage i remlommerne på inderside- og ydersidekanterne af HoverSling Split-Leg.

BRUGSANVISNING - PATIENT PÅ STOL

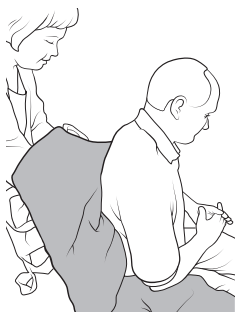


1. Åbn bensepænderne. Læn patienten fremad. Før spidsen af slyngens hestesko bagom patienten indtil du rører sædet, hvilket sikrer, at slyngen er centreret på patientens torso. Få patienten til at læne sig tilbage mod slyngen for at holde den på plads.

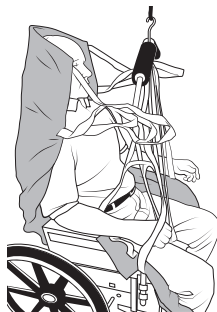

3. Fastgør skulderremmen til bøjlen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche replacering på venstre og højre side af patienten. Kortere remstropper ved skulderen (blå/beige) medfører en mere opret siddestilling, mens længere skulder- og benremme (hvide) øger tilbagelænsvinklen og reducerer hoftens bøjning].




2. Læg bensektionerne langs med siden af hofter og ben, og læg derefter hver bensektion under hver sit ben.

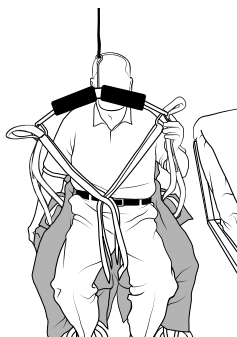

4. Kryds indvendige benstøtteremme ved at tage en benstøtterem og føre den over til den anden, på den anden side. Fastgør indvendige og udvendige benstøtteremme til bøjlen. Flyt patienten.

Emneidentifikation – HoverSling® Repositioning Sheet HoverSling Repositioning Sheet med HoverCover™

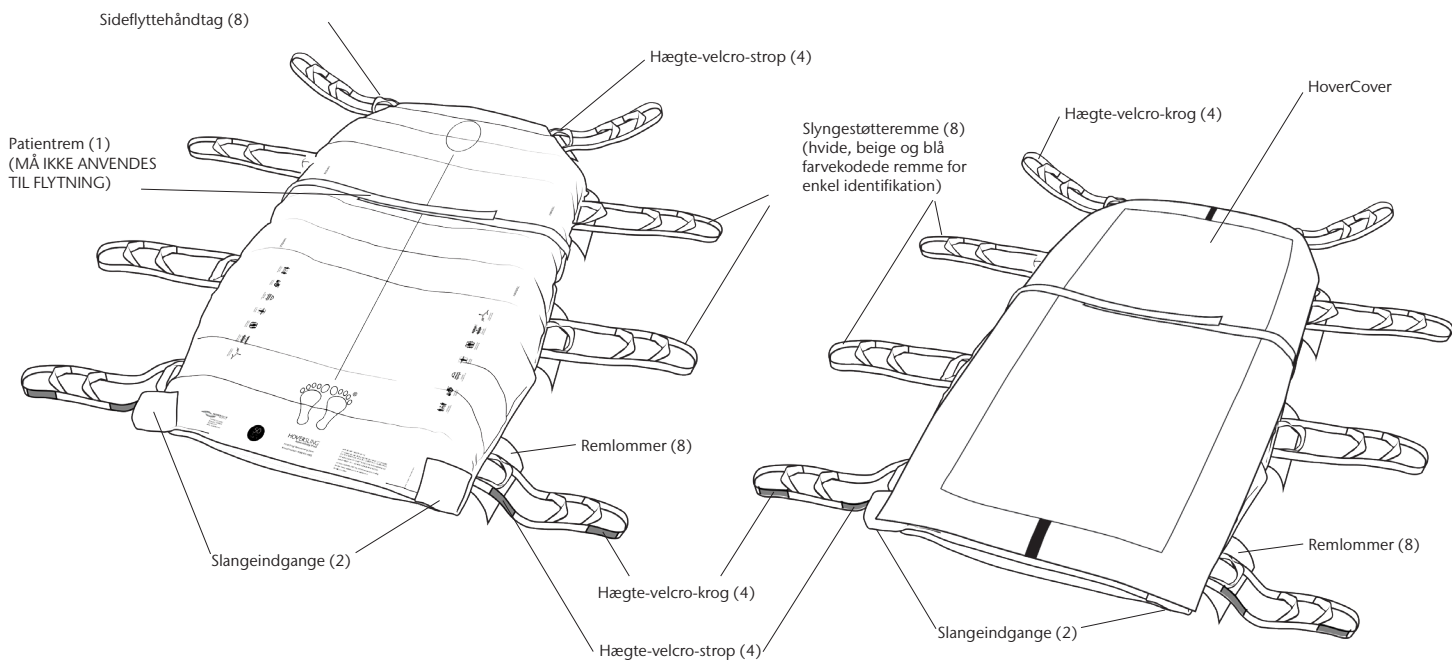

Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør

HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Materiale:	Overdel: Polyesterstrikk Underdel: Nylonwill
Udformning:	Syet
Bredde:	39" (99 cm) 50" (127 cm)
Længde:	78" (198 cm)

HoverSling Repositioning Sheet

Modelnr.: HMSLING-39RS-B – 39" W x 78" L (5 pr. kasse)*

Modelnr.: HMSLING-50RS-B – 50" W x 78" L (5 pr. kasse) *

Modelnr.: HMSLING-39RS-TVA-B – 39" W x 78" L (5 pr. kasse)*

Modelnr.: HMSLING-50RS-TVA-B – 50" W x 78" L (5 pr. kasse) *

HoverSling Repositioning Sheet med HoverCover

Modelnr.: HMSLING-39RS-HC – 39" B x 78" L (5 pr. kasse)*



VÆGTGRÆNSE 454 KG / 1.000 LBS

*Åndbar model

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN FLYTTEMADRAS:

Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A

Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A

Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A

Modelnr.: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

Modelnr.: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN SLYNGE:

Et patientløft med 2-, 3- eller 4-punkts strop lignende bøjler beregnet til brug med:

- Mobile hejser
- Hejsevogne
- Stationære hejser fastgjort til væggen/væggene, gulvet og/eller loftet
- Stationære fritstående hejser

Påsætning af HoverSling® Repositioning Sheet** hægte-slyngeremme

1. Tråd en ende af HoverSling hægte-slyngeremmen gennem en del af sengestellet (hovedgærdet eller sengeheste kan bruges*) øverst på sengen.
 2. Fæst krogen af velcro-slyngeremmen til velcro-stroppen og fastgør den.
 3. Gentag processen på den modsatte side af sengen.
 4. Ved hjælp af den samme metode, fæst velcro-slyngeremmen i fodenden af sengen.
- Bemærk: Sørg for at fjerne hægte-slyngeremmen før patienten flyttes. Opbevar slyngeremmen i sidelommerne, når de ikke er i brug.

* Alt efter sengetype og hospitalets regler.

Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet**, brugt som flyttemadras


1. Sørg for at slyngestøtteremmen opbevares i remlommerne.
2. Patienten skal helst ligge på ryggen.
3. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulleteknik, og spænd patientremmene løst.
4. Sæt HoverTech-luftforsyningens ledning i en stikkontakt.
5. Sæt slangedysen i en af de to slangeindgange i fodenden af HoverSling Repositioning Sheet, og skub den på plads.
6. Sørg for, at flyttelejerne er så tætte på hinanden som muligt, og lås alle hjul.
7. Hvis det er muligt, flyt fra et højere leje til et lavere leje.
8. Tænd for HoverTech-luftforsyningen.
9. Skub den oppustede HoverSling Repositioning Sheet i en vinkel, enten hovedet først eller fødderne først. Når der nås halvvejs, skal den modsatte plejer tage fat i de nærmeste håndtag og trække den i den ønskede position.
10. Sørg for, at patienten er på modtagerudstyret før luften lukkes ud.
11. Sluk for luftforsyningen, og løft sengens/bårens sengeheste. Spænd patientremmen op.

BEMÆRK: To luftforsyninger kan anvendes til oppustning, når 50" HoverSling® Repositioning Sheet anvendes.


Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet**, brugt som slynge

BRUGSANVISNING - PATIENT I SENG

Bemærk: HoverSling® Repositioning Sheet har otte (8) slyngestøtteremme, som skal fastgøres.

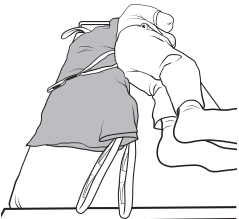

1. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulleteknik.

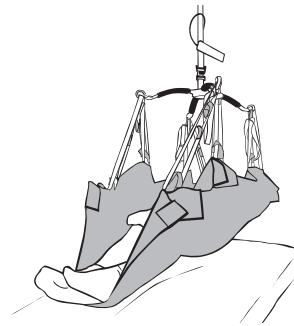

2. Fastgør skulderremmen til bøjlen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche remplacering på venstre og højre side af patienten]. Løft patienten i henhold til lift-producentens vejledning.


BRUG AF REM						
TEKNIK	Siddende flytning Opret	Siddende flytning Tilbagelænet	Løft i liggende stilling	Vending	Hygiejne/pleje af mellemkød	Stilling på mave (Brug løfteteknik til liggende stilling til at flytte patienten tættere på sengekanten. Følg derefter guiden om brug af rem herunder på den ene side for at vende patienten).
1. sæt (hoved)	Grøn	Blå	Brun	Du kan bruge – blå, brun eller undlad	UNDLAD	Du kan bruge – blå, brun eller undlad
2. sæt (skulder)	Blå	Brun	Blå	Blå	Blå	Blå
3. sæt (hoft)	UNDLAD	UNDLAD	Blå	Blå	UNDLAD	Blå
4. sæt (fod)	Hvid	Hvid	Brun	Du kan bruge – brun, hvid eller undlad	UNDLAD	Du kan bruge – brun, hvid eller undlad

Dette er blot en vejledning til brug af HoverSling Repositioning Sheet. Brug klinisk vurdering i forhold til patientspecifikke behov.


** Kan bruges sammen med eller uden HoverCover

Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet**, brugt som slynge (fortsat)

BRUGSANVISNING - TILBAGE I SENG

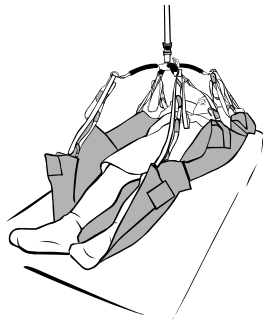

1. Placer patienten over midten af sengen. Sænk patienten ned på sengen.

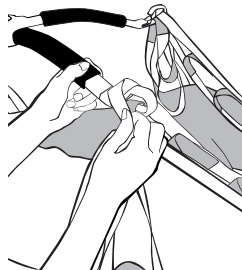


2. Fjern remstropperne fra bæjlen.




3. Læg slyngestøtteremmen tilbage i remlommerne på inderside- og ydersidekanterne af HoverSling Repositioning Sheet.


BRUGSANVISNING - LATERAL VENDING/NEDLÆGNING

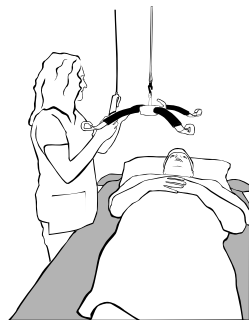

1. Med patienten centreret på HoverSling® Repositioning Sheet skal du sænke bæjlen til en komfortabel arbejds højde.

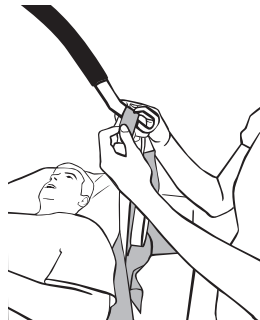


2. Løft sengehestene, og fastgør alle fire (4) remme på den modsatte side af patienten. Vend mod stropper på samme side af bæjlen startende i fodenden.

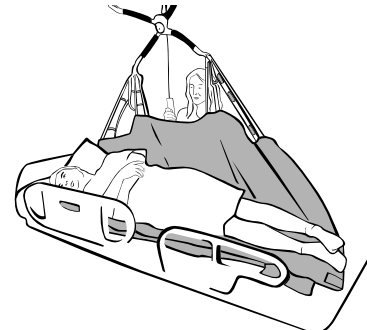


3. Når liften løftes vil patienten vende mod den modsatte side af sengen i forhold til den, som remmene er fastgjort til. Brug kiler for at holde patienten i stillingen, om ønsket. Efter at opgaven er fuldført, sænk bæjlen og fjern slyngeremmen.

* For at lægge ned, fortsæt vendingen og juster patient/enhed efter behov, efter at opgaven er fuldført.


BRUGSANVISNING - HYGIEJNEVENDING

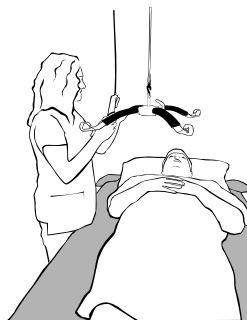

1. Med patienten centreret på HoverSling® Repositioning Sheet skal du sænke bæjlen til en komfortabel arbejds højde.

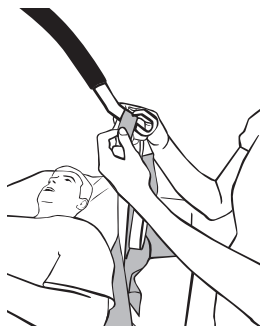

2. Løft sengehestene, og fastgør slyngeremmen, som er nærmest patientens skulder, til bæjlen.

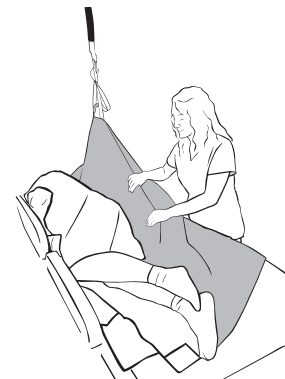

3. Når liften løftes, vil patienten begynde at dreje mod siden modsat den forbundne rem. Lad slyngen være for at udføre opgaven. Efter at opgaven er fuldført, sænk bæjlen og fjern slyngeremmen.


** Kan bruges sammen med eller uden HoverCover

Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som slynge (fortsat)


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA SENGEN




1. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulleteknik. Hæv hovedenden af sengen for at forberede den siddende flytning.

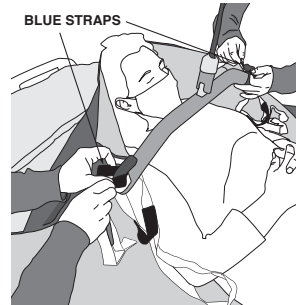

3. Fastgør den blå slyngerem på hver skulderside (for både 39" og 50").

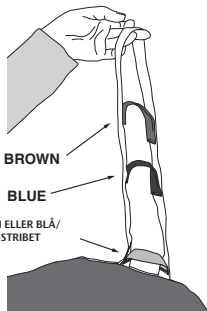

2. Fastgør remmene ved hovedenden af HoverSling til bøjlen. For en helt opret siddestilling - brug flyttehåndtaget (grønt for 39" og blå/hvid-stribet for 50"). For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå for både 39" og 50") for at reducere hoftebøjningen.

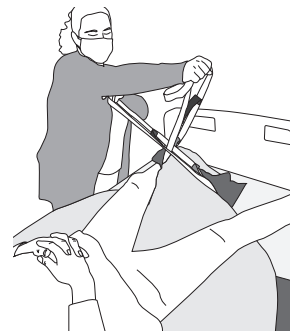


4. Fold HoverSling mellem patientens ben, og placer fødderne på hver side af HoverSling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.

BEMÆRK: Når du er muligt, skal du læne stolen tilbage og hæve fodstøtten. Velcro-stropperne kan bruges til at fastgøre slyngen til stolen, hvis det er relevant.


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA STOL



1. Sørg for, at HoverSling er korrekt placeret under patienten inden remmen fastgøres.

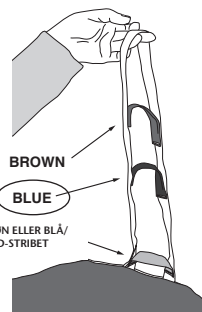

3. Fastgør den blå slyngerem på hver skulderside (for både 39" og 50"). Sørg for at der er masser af ekstra plads i bøjlen til at fastgøre fodende-remmene uden at skubbe patienten af stolen.

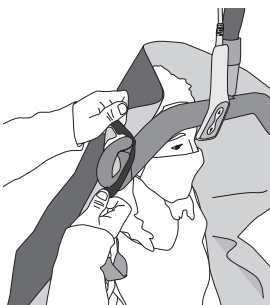


2. Fastgør remmene ved hovedenden af HoverSling til bøjlen. For en helt opret siddestilling - brug flyttehåndtaget (grønt for 39" og blå/hvid-stribet for 50"). For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå for både 39" og 50") for at reducere hoftebøjningen.



4. Fold HoverSling mellem patientens ben og placer fødderne på hver side af HoverSling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.


** Kan bruges sammen med eller uden HoverCover

Emneidentifikation – HT-Air®-luftforsyning

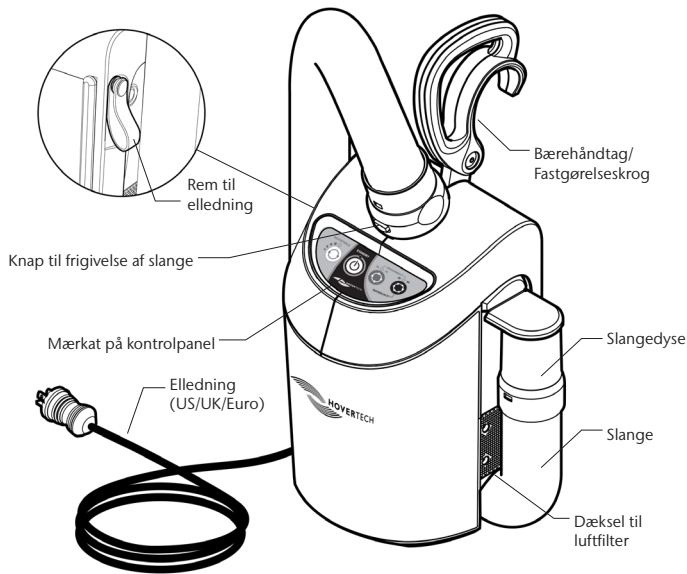

HT-Air må ikke anvendes sammen med HJBSC-200 HoverJack-batterivognen.

HT-Air®-tastaturfunktioner

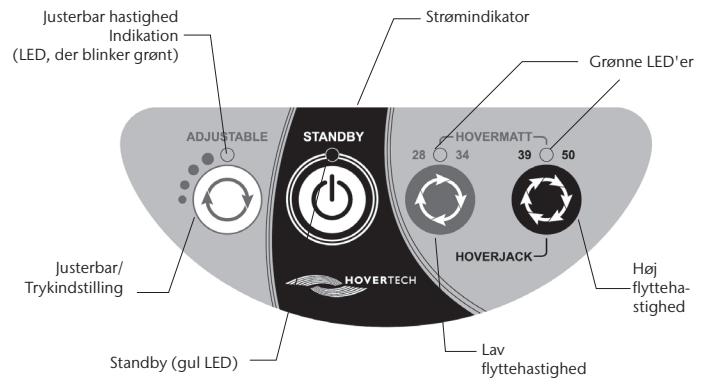

JUSTERBAR: Til brug sammen med HoverTechs luftassisterede placeringsudstyr. Der er fire forskellige indstillinger. Hvert tryk på knappen øger lufttrykket og -hastigheden på oppustningen. Den grønne, blinkende LED angiver oppustningshastigheden med det antal blink (dvs. to blink svarer til den anden oppustningshastighed).

Alle indstillingerne i det JUSTERBARE område er væsentligt lavere end HoverMatt- og HoverJack-indstillingerne. Den JUSTERBARE funktion må ikke anvendes til flytning.

Den JUSTERBARE indstilling er en sikkerhedsfunktion, der kan anvendes til at sikre, at patienten er centreret på det HoverTech luftassisterede udstyr og til langsomt at vænne en patient, som er angst eller har smerter til både lyden og funktionaliteten af det oppustede udstyr.



STANDBY: Anvendes til at stoppe oppustning/luftstrøm (gul LED angiver STANDBY-tilstanden).



HOVERMATT 28/34: Til brug sammen med 28" og 34" HoverMatt og HoverSling.



HOVERMATT 39/50 og HOVERJACK: Til brug sammen med 39" og 50" HoverMatt og HoverSling og 32" og 39" HoverJack.

Air200G/Air400G-luftforsyning

Hvis HoverTechs Air200G- eller Air400G-luftforsyninger anvendes, skal du trykke på den grå knap øverst på beholderen for at starte luftstrømmen. Tryk på knappen igen for at stoppe luftstrømmen.

Rengøring

For at hjælpe til at holde HoverSling ren anbefaler HoverTech brugen af HoverCover™ eller deres Disposable Sheets. Hvad end patienten ligger på for at holde hospitalssengen ren kan også lægges oven på HoverSling. HoverSling er til en enkelt patients brug og er ikke beregnet til at blive vasket.

HoverSling har en forventet levetid på 30 dage under normale brugsforhold. Hvis HoverSling er meget snavset, skal den kasseres og udskiftes med en ny.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

HoverSling skal kontrolleres før hvert brug for at sikre, at der ikke er nogen skade, som kunne betyde, at den ikke fungerer som tiltænkt. Den skal have alle sikkerhedsremme, og slyngestøtteremme og håndtag skal være intakte. Må ikke vaskes-mærkatet ("Do Not Launder") skal være intakt. Der må ikke være revner, huller eller løse tråde. Hvis en sådan skade findes, skal HoverSling kasseres. HoverSling er beregnet til brug under hele patientens ophold på hospitalet/plejehjemmet.

INFEKTIONSBEKÆMPELSE

Hvis HoverSling er brugt på en isolationspatient, skal hospitalet bruge samme regler/procedurer, som det bruger til bortskaffelse af andre kontaminerede enheder til en enkelt patients brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFORSYNINGEN

Se brugsanvisningen til luftforsyningen.



Når et produkt når til slutningen af dets levetid, skal det opdeles efter materialetyper, så delene kan genbruges eller bortskaffes korrekt, med overholdelse af lokale krav.

Transport og opbevaring

Dette produkt kræver ingen specielle opbevaringsforhold.

Returnering og reparation

Alle produkter, der returneres til HoverTech, skal have et RGA (returvaregodkendelse)-nummer, der er udstedt af virksomheden. Ring på (800) 471-2776, og spørg efter et medlem af RGA-holdet, som vil udstede et RGA-nummer til dig. Hvis et produkt returneres uden et RGA-nummer, vil det forårsage forsinkelse i reparationstiden.

Returnerede produkter skal sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europæiske virksomheder skal sende returnerede produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

Find produktgarantier ved at besøge vores websted:
<https://hovertechinternational.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com

Disse produkter overholder de gældende standarder for produkter i klasse 1 i forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp Sverige



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I tilfælde af en uønsket hændelse i forhold til enheden skal hændelser rapporteres to vores autoriserede repræsentant. Vores autoriserede repræsentant videregiver oplysninger til producenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com