

HOVERMATT®

PROS™ Sling

Système de repositionnement pour soulager la pression des patients (Patient Repositioning Off-Loading System, PROS)

Manuel d'utilisation



Consulter www.HoverTechInternational.com pour les autres langues

TABLE DES MATIÈRES

Explication des symboles.....	2
Utilisation prévue et précautions	3
Identification de la pièce - HoverMatt® PROS Sling	4
Spécifications du produit/Accessoires requis	4
Mode d'emploi 5-9	
Nettoyage et entretien préventif.....	10
Retours et réparations.....	11

Référence des symboles

	MARQUAGE DE CONFORMITÉ CE		BARRE DE SUSPENSION EN FORME DE BOUCLE
	MARQUAGE DE CONFORMITÉ ROYAUME-UNI		NUMÉRO DE LOT
	REPRÉSENTANT AUTORISÉ		FABRICANT
	PERSONNE RESPONSABLE POUR LE ROYAUME-UNI		DATE DE FABRICATION
	REPRÉSENTANT AUTORISÉ EN SUISSE		DISPOSITIF MÉDICAL
	MISE EN GARDE / AVERTISSEMENT		NUMÉRO DE MODÈLE
	FIXER LA SANGLE DE RACCORDEMENT		COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT DE RM
	MISE AU REBUT		UN SEUL PATIENT - PLUSIEURS USAGES
	EXTRÉMITÉ DU PIED		NE PAS BLANCHIR
	IMPORTATEUR		IDENTIFIANT DE DISPOSITIF UNIQUE
	MODE D'EMPLOI		LIMITE DE POIDS DU PATIENT
	SANS LATEX		

Utilisation prévue et précautions

UTILISATION PRÉVUE

- Le HoverMatt PROS (Patient Repositioning Off-Loading System) Sling est utilisé pour aider les soignants à positionner le patient (y compris à le rehausser et à le tourner), à le soulever verticalement, à le transférer latéralement et à le mettre à plat ventre. Le système permet de soulager la pression des protubérances osseuses pour faciliter la conformité au Q2, de réduire le cisaillement et la friction lors du repositionnement et d'améliorer la gestion du microclimat. Il offre une solution pour tourner et repositionner les patients en toute sécurité tout en réduisant la charge de travail des soignants.

INDICATIONS

- Patients incapables d'aider à leur propre repositionnement (y compris se tourner et se rehausser) et à leur transfert latéral.
- Patients qui ont besoin d'une rotation Q2 pour relâcher la pression.
- Patients devant être mis à plat ventre.

CONTRE-INDICATIONS

- N'utilisez pas ce dispositif sans lève-personne au plafond ou au sol si le patient pèse plus de 550 lbs (250 kg).
- N'utilisez pas ce dispositif avec un lève-personne de plafond ou de sol si le patient pèse plus de 1 000 lbs (ou la capacité de charge du lève-personne, la limite la plus basse étant retenue).
- N'utilisez pas ce dispositif en tant qu'élingue chez les patients souffrant de fractures thoraciques, cervicales ou lombaires jugées instables, à moins qu'une décision clinique n'ait été prise par votre établissement.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRÉVUS

- Hôpitaux, établissements de soins prolongés ou à long terme
- Matière respirante : peut être laissée sous le patient.

PRÉCAUTIONS – UTILISATION EN TANT QUE DRAPS DE TRANSFERT

- Les soignants doivent vérifier que tous les freins sont enclenchés avant le transfert.
- Mobilisez au moins deux soignants lors des transferts latéraux des patients.
- Pour les positionnements dans le lit, plusieurs soignants doivent intervenir.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel.
- Lors du transfert vers un matelas à faible perte d'air ou du positionnement sur un matelas à faible perte d'air, réglez le débit d'air du matelas au niveau le plus élevé pour obtenir une surface ferme.
- Des produits de soutien supplémentaires peuvent être nécessaires entre les surfaces lors du transfert.

PRÉCAUTIONS – POUR UTILISATION EN TANT QU'ÉLINGUE

- Pour les transferts, plusieurs soignants doivent intervenir.
- Pour les positionnements dans le lit, plusieurs soignants doivent intervenir.
- Pour la mise à plat ventre, regardez la vidéo explicative de HoverTech sur www.HoverTechInternational.com.
- Le PROS Sling ne doit être utilisé que par un personnel formé.
- N'utilisez que des accessoires autorisés par HoverTech.
- Une évaluation clinique doit être effectuée avant de lever les patients avec le PROS Sling.
- Assurez-vous que le PROS Sling n'est attaché à aucun objet autre que la barre de suspension en forme de boucle.
- Lors de la connexion à une barre de suspension de type boucle, assurez-vous que les couleurs des boucles de sangle correspondent à celles du côté gauche et du côté droit du patient.
- Une fois que les sangles de maintien de la toile sont complètement étendues, assurez-vous qu'elles sont correctement raccordées à la barre de suspension avant de lever le patient.
- Ne relevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour effectuer le transfert ou le levage.
- Ne laissez jamais le patient sans surveillance lorsque vous utilisez le PROS Sling pour le soulever.
- Utilisez le PROS Sling conformément aux instructions de levage et du PROS Sling.
- Si la limite de poids diffère entre le lève-patient, la barre de suspension et la toile PROS Sling, la limite de poids la plus faible s'applique.



Si vous remarquez un dommage, mettez le PROS Sling hors service et jetez-le.



Les barrières latérales doivent être relevées avec un seul soignant.



Utilisez uniquement avec la barre de suspension en forme de boucle.




Au bloc opératoire - Pour éviter que le patient ne glisse, dégonflez toujours le PROS Sling et attachez le patient et le PROS Sling à la table d'opération avant de mettre la table en position inclinée.

PRÉCAUTIONS – IRM

- Le HoverMatt PROS Sling est compatible pour une utilisation dans un environnement de RM sous certaines conditions, sur la base du raisonnement suivant. L'appareil est fabriqué à partir de matériaux non ferreux. Par conséquent, aucun test de sécurité RM n'a été effectué. Sur la base de ce raisonnement, le HoverMatt PROS Sling est électriquement non-conducteur et non-magnétique.

Identification de la pièce – PROS Sling

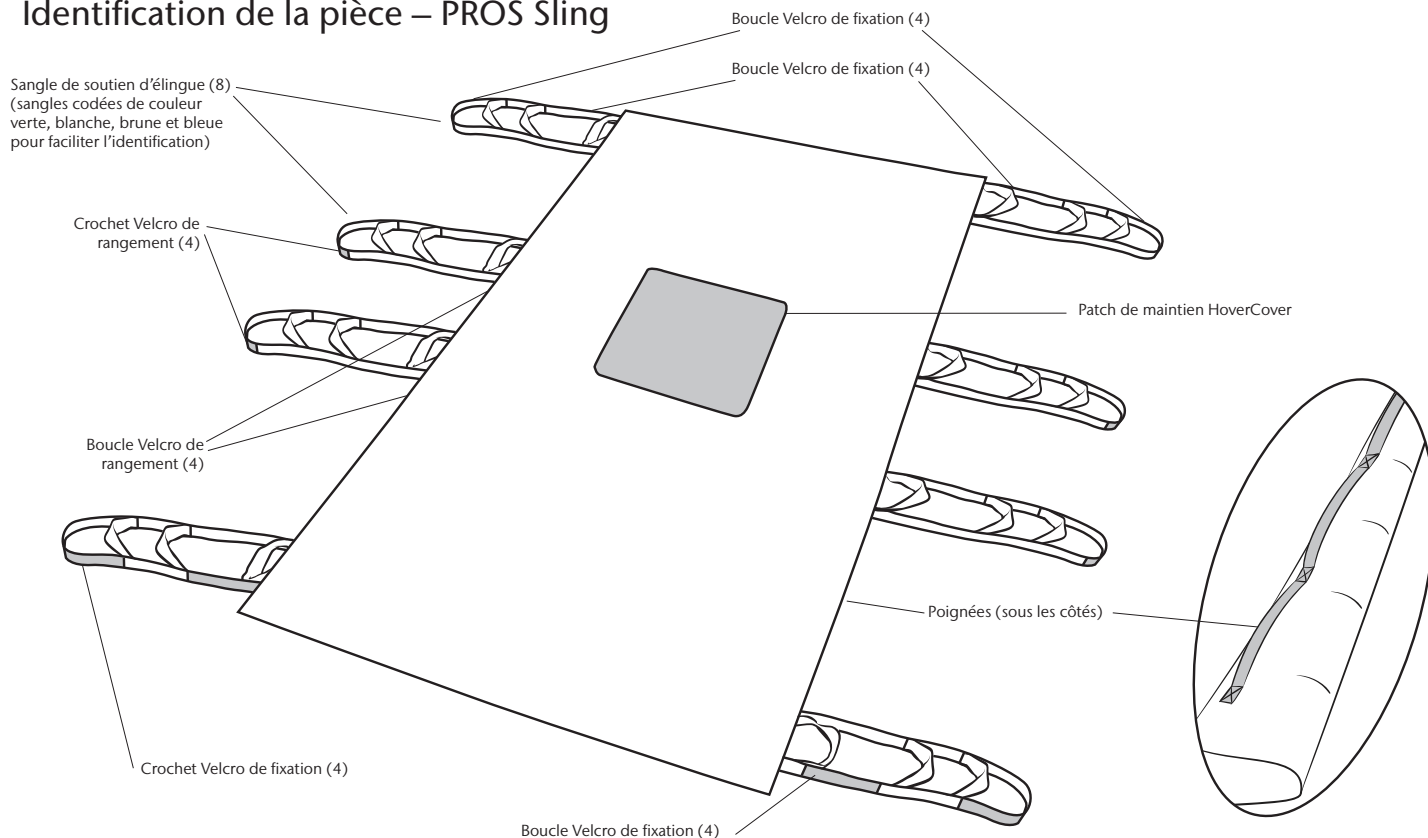

Spécifications du produit/Accessoires requis

PROS Sling

Matériaux :	Twill en nylon
Fabrication :	Cousu
Largeur :	110,49 cm
Longueur :	198 cm

ACCESSOIRE REQUIS POUR UTILISATION EN TANT QU'ÉLINGUE :

Tout lève-patient à barre de suspension de type boucle à 2, 3 ou 4 points, conçu pour être utilisé avec des :

- Palans mobiles
- Chariots de levage
- Palans non-mobiles fixés au(x) mur(s), au sol et / ou au plafond
- Palans autoportants stationnaires

N° de modèle : PROS-SL-KIT (élingue non pneumatique + HoverCover + paire de cales)
3 par carton*

N° de modèle : PROS-SL-CS (élingue non pneumatique + HoverCover) 5 par carton



LIMITE DE POIDS 550 LBS/250 KG (draps de transfert)

454 KG (sangle)

*La paire de cales comprend : 1 cale avec tapis et 1 sans tapis, comprimée

Instructions d'utilisation – PROS Sling*

PLACER LE PRODUIT SOUS LE PATIENT – TECHNIQUE DE ROULEMENT

1. Ouvrez le produit et placez-le dans le sens de la longueur à côté du patient.
2. Dépliez le PROS Sling le plus éloigné du patient sur le côté du lit.
3. Glissez l'autre côté sous le patient aussi loin que possible.
4. Faites rouler le patient sur le côté vers l'élingue dépliée. Déroulez le reste de l'élingue qui se trouve sous le patient de façon à couvrir le lit.
5. Placez le patient en décubitus dorsal. Tirez sur l'élingue pour éliminer les plis éventuels.

FIXATION AU CADRE DU LIT

1. Fixez sans serrer le crochet Velcro à la boucle Velcro autour des points solides du cadre du lit (ou à la tête de lit ou aux rails latéraux selon les protocoles de votre établissement ou le type de lit) afin de réduire le déplacement de l'élingue.
2. Répétez l'opération sur les trois autres coins de l'élingue.
3. Déconnectez les sangles de l'élingue avant d'effectuer des manœuvres de rehaussement, de retournement, de mise à plat ventre, de levage et/ou de transfert.

Instructions d'utilisation en tant que draps de transfert

REHAUSSER/REPOSITIONNER

(pour faciliter les efforts de rehaussement, placez le lit en position de Trendelenburg avant de rehausser le patient.)

1. Assurez-vous que les freins sont engagés. Plusieurs soignants peuvent être nécessaires pour effectuer cette tâche. Si un soignant effectue cette tâche seul, relevez les rails latéraux.
2. Placez la toile PROS sous le patient avec la technique de roulement. Assurez-vous que le patient est centré sur le produit avant de le déplacer.
3. À l'aide des poignées de l'élingue, le soignant rehausse/repositionne le patient en veillant à adopter une position ergonomique.

Note : Pour une utilisation avec un lève-personne de plafond ou de sol, consultez le guide de suggestion des sangles à la page 5 pour la fixation à une barre de suspension de type boucle.

ROTATION/PLACEMENT DE LA CALE

1. Assurez-vous que les freins sont engagés. Plusieurs soignants peuvent être nécessaires pour effectuer cette tâche. Si un soignant effectue cette tâche seul, relevez les rails latéraux.
2. Assurez-vous que le patient est centré sur le produit avant de le déplacer.
3. Placement des cales
 - a. Pour insérer les cales, tenez le PROS Sling par les poignées et placez les cales entre le lit et l'élingue.
 - b. Insérez le tapis de la cale sous les cuisses du patient. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast™.
 - c. Placez la cale standard pour soutenir le dos du patient à environ une largeur de main de la cale à tapis. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast.
 - d. Tirez le tapis jusqu'à l'autre côté du patient pour fixer la cale en place.
 - e. Une fois les cales en place, assurez-vous que le sacrum ne touche pas le lit (flottement). S'il touche le lit, repositionnez les cales pour soulager le sacrum.
4. Retournement pour la toilette, remplacement du HoverCover™, placement de la cale (rotation non pneumatique)
 - a. Un soignant se place de chaque côté du patient, l'un des soignants passe les sangles de l'élingue à l'autre soignant qui effectuera la rotation
 - b. En veillant à adopter une position ergonomique, le soignant qui retourne le patient commencera à tirer sur les sangles de l'élingue pour faciliter la rotation. Le patient commence à rouler sur le côté en direction du soignant qui effectue la rotation
 - c. Si vous remplacez l'HoverCover ou effectuez un retournement pour la toilette, le soignant du côté opposé maintiendra le patient sur le côté tandis que le soignant qui effectue la rotation lâchera les poignées et retiendra la hanche et l'épaule du patient pour le stabiliser.
 - d. Pendant que le patient est tourné, il est possible d'effectuer des soins d'hygiène et d'enlever et de remettre le HoverCover.
 - e. Répétez l'opération de l'autre côté avant de placer les cales.Localisez le sacrum du patient et placez la cale sous le sacrum. Insérez le tapis de la cale sous les cuisses du patient. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast.
 - g. Placez la cale standard pour soutenir le dos du patient à environ une largeur de main de la cale à tapis. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast.
 - h. Remettez le patient en position de décubitus dorsal.
 - i. Tirez le tapis jusqu'à l'autre côté du patient pour fixer la cale en place.
 - j. Une fois les cales en place, assurez-vous que le sacrum ne touche pas le lit (flottement). S'il touche le lit, repositionnez les cales pour soulager le sacrum.

*Chaque PROS Sling comprend une alèse absorbante HoverCover. Le PROS Sling doit être idéalement utilisé avec une alèse HoverCover ou un alèse absorbante ou un drap de lit approuvé par l'hôpital.

Instructions d'utilisation en tant que draps de transfert

ROTATION/PLACEMENT DE LA CALE (SUITE)

5. Placement de la cale avec un lève-personne portatif ou au plafond (soignant seul)
 - a. Relevez les barrières latérales du lit du côté opposé auquel le patient sera tourné. Veillez à ce que le patient soit centré et faites-le glisser dans la direction opposée à la rotation en utilisant soit l'élingue pour le soulever, soit une technique manuelle. Cela permettra au patient d'être centré sur le lit lorsqu'il sera repositionné sur les cales.
 - b. Fixez les boucles de sangles d'épaule et de hanche de l'élingue à la barre de suspension qui doit être parallèle au lit. Levez le lève-personne pour initier la rotation.
 - c. Insérez le tapis de la cale sous les cuisses du patient. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast™.
 - d. Placez la cale standard pour soutenir le dos du patient à environ une largeur de main de la cale à tapis. Veillez à ce que la partie arrière de la cale soit surélevée jusqu'à ce que la position soit définie, puis abaissez la cale pour la fixer en place à l'aide de la mousse HoldFast.
 - e. Une fois les cales placées, abaissez le patient sur les cales, en veillant à ce que les sangles ne soient pas sous l'élingue PROS.
 - f. Faites passer le tapis de l'autre côté du patient jusqu'à ce qu'il soit tendu. Vérifiez le positionnement des cales en plaçant votre main entre les cales, en confirmant que le sacrum ne touche pas le lit. S'il touche le lit, repositionnez les cales pour soulager le sacrum.

MISE À PLAT VENTRE

1. Assurez-vous que les freins sont engagés. L'intervention de plusieurs soignants est nécessaire pour effectuer cette tâche.
2. Assurez-vous que le patient est centré sur le produit avant de le déplacer.
3. Faites glisser le patient et le PROS Sling sur un côté du lit pour avoir de la place pour la rotation.
4. Placez un autre ensemble HoverCover et PROS Sling sur le patient. Rabattez le matelas au niveau des épaules pour maintenir le visage exposé.
5. Enroulez les deux élingues ensemble vers le patient pour l'envelopper.
6. En tenant fermement les élingues enroulées, tournez le patient sur le côté. Les soignants des côtés opposés doivent inverser leurs mains (les mains du haut doivent être inversées avec celles du bas).
7. Continuez à tourner après avoir inversé la position des mains. Déroulez les élingues et retirez le PROS supérieur et le HoverCover.
8. Positionnez le patient conformément au protocole de l'établissement.

Note : Pour une utilisation en tant qu'élingue avec un lève-personne de plafond ou de sol, consultez le guide de suggestion des sangles ci-dessous pour la fixation à une barre de suspension de type boucle.

TRANSFERT LATÉRAL

1. Le patient doit être en décubitus dorsal et centré sur le PROS Sling.
2. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que possible et verrouillez toutes les roues.
3. Si possible, transférez d'une surface supérieure à une surface inférieure. Comblez l'écart entre les deux surfaces à l'aide d'un drap ou d'une couverture supplémentaire.
4. Saisissez les poignées sous l'élingue et faites glisser le patient sur la surface de réception.
5. Assurez-vous que le patient est centré sur l'équipement récepteur.
6. Soulevez les rails du lit/de la civière.

Note : Pour une utilisation en tant qu'élingue avec un lève-personne de plafond ou de sol, consultez le guide de suggestion des sangles ci-dessous pour la fixation à une barre de suspension de type boucle.

Instructions d'utilisation en tant qu'élingue*

UTILISATION DES SANGLES

TECHNIQUE	Transfert assis Droit	Transfert assis Incliné	Levage en décubitus dorsal	Rotation	Hygiène/Soins du périnée	Mise à plat ventre (Utilisez la technique de lever en décubitus dorsal pour rapprocher le patient du côté du lit. Puis suivez l'utilisation des sangles ci-dessous d'un côté pour retourner le patient).
1er ensemble (tête)	Vert	Bleu	Marron	Vous pouvez utiliser Bleu, Marron ou ignorer	Ignorer	Vous pouvez utiliser Bleu, Marron ou ignorer
2e ensemble (épaule)	Bleu	Marron	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
3e ensemble (hanche)	Ignorer	Ignorer	Bleu	Bleu	Ignorer	Bleu
4e ensemble (pied)	Blanc	Blanc	Marron	Vous pouvez utiliser Blanc, Marron ou ignorer	Ignorer	Vous pouvez utiliser Blanc, Marron ou ignorer


Ce document n'est qu'un guide d'utilisation de PROS™ Air Sling. Veuillez faire preuve de jugement clinique pour les besoins spécifiques du patient.

*Chaque PROS Sling comprend une alèse absorbante HoverCover. La PROS Sling doit être idéalement utilisée avec une alèse HoverCover ou un alèse absorbante ou un drap de lit approuvé par l'hôpital.


Instructions d'utilisation en tant qu'élingue*

MODE D'EMPLOI – PATIENT AU LIT

N.B. : La toile PROS Sling comporte huit (8) sangles de support qui doivent être attachées.

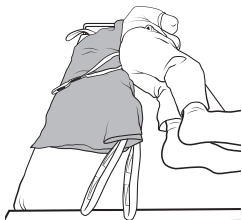


1. Placez la toile PROS Sling sous le patient à l'aide de la technique du déplacement en bloc.

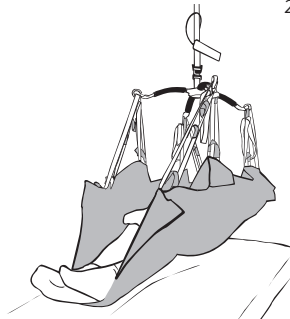

2. Fixez toutes les sangles à la barre de suspension pour la sécurité et le confort appropriés du patient. [Les boucles de sangle à code couleur facilitent l'identification afin d'adapter le placement de la sangle sur les côtés gauche et droit du patient.] Relevez le patient conformément aux instructions du fabricant de l'appareil de levage.


MODE D'EMPLOI – PATIENT(E) RAMENÉ(E) AU LIT

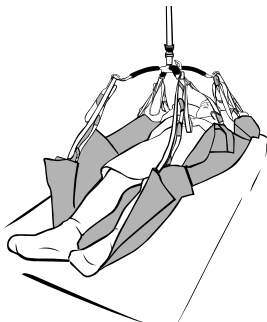

1. Positionnez le patient au-dessus du centre du lit. Abaissez le patient sur le lit.



3. Fixez de nouveau les sangles de l'élingue au Velcro pour éviter que les sangles ne traînent et pour réduire le rehaussement (voir le tableau pour la fixation au cadre de lit).

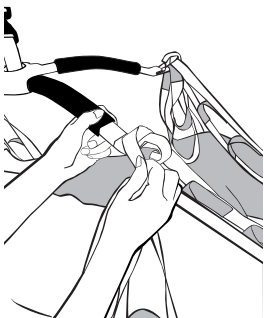


2. Détachez les boucles de sangle de la barre de suspension.


*Chaque PROS Sling comprend une alèse absorbante HoverCover. La PROS Sling doit être idéalement utilisée avec une alèse HoverCover ou un alèse absorbante ou un drap de lit approuvé par l'hôpital.

Instructions d'utilisation en tant qu'élingue*

MODE D'EMPLOI – TOUR LATÉRAL/MISE À PLAT VENTRE

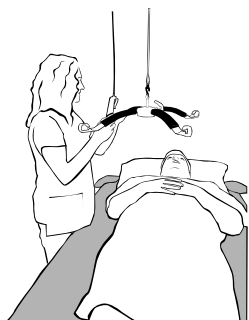


1. Le patient centré sur la toile PROS Sling, rabaissez la barre de suspension à une hauteur de travail confortable.

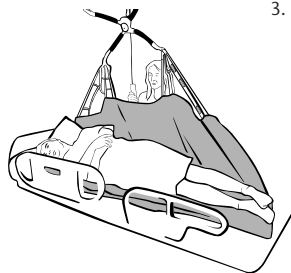


3. Lorsque l'appareil de levage est relevé, le patient se tournera vers le côté opposé du lit auquel les sangles sont attachées. Utilisez des cales pour maintenir le patient en position si vous le souhaitez. Une fois la tâche terminée, rabaissez la barre de suspension et retirez les sangles.

* En décubitus ventral, continuez à tourner et ajustez le patient / l'appareil si nécessaire une fois la tâche terminée.

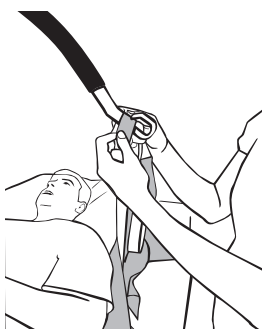


2. Relevez les barrières du lit et attachez (voir le tableau pour référence) les sangles du côté opposé à la rotation du patient aux boucles du même côté de la barre de suspension en commençant par les pieds.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION – RETOURNEMENT POUR LA TOILETTE

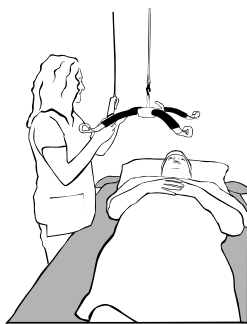

1. Le patient centré sur le PROS Sling, rabaissez la barre de suspension à une hauteur de travail confortable.

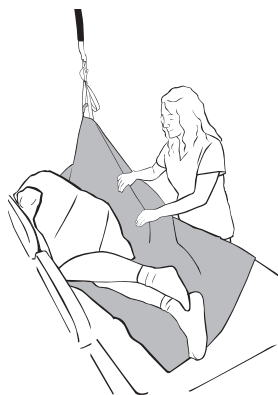

3. Lorsque l'appareil de levage est soulevé, le patient commencera à se tourner vers le côté opposé à la sangle attachée. Laisser l'élingue en place pour effectuer la tâche. Une fois la tâche terminée, rabaisser la barre de suspension et retirez la sangle d'élingue.

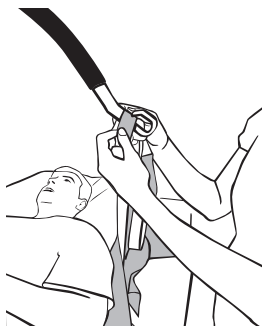


2. Relevez les côtés du lit et attachez la sangle la plus proche de l'épaule du patient à la barre de suspension.


*Chaque PROS Sling comprend une alèse absorbante HoverCover. La PROS Sling doit être idéalement utilisée avec une alèse HoverCover ou un alèse absorbante ou un drap de lit approuvé par l'hôpital.

Instructions d'utilisation en tant qu'élingue*


MODE D'EMPLOI – TRANSFERT EN POSITION ASSISE DEPUIS LE LIT

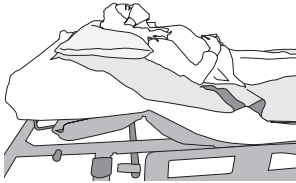


1. Positionnez la toile PROS Sling sous le patient à l'aide de la technique du déplacement en bloc. Élevez la tête du lit pour préparer le transfert en position assise.

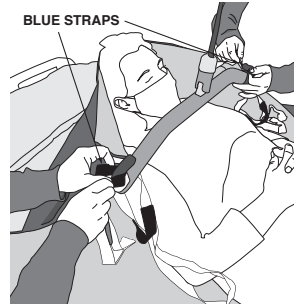

3. Attachez la sangle bleue de chaque côté de l'épaule. Ignorez les élingues pour les hanches.

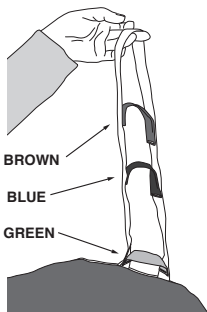

2. Fixez les sangles à la tête de la toile PROS Sling sur la barre de suspension. Pour une position assise totalement verticale, utilisez la poignée verte. Pour la position assise inclinée – utilisez la première sangle d'élingue (bleue) afin réduire la flexion de la hanche.

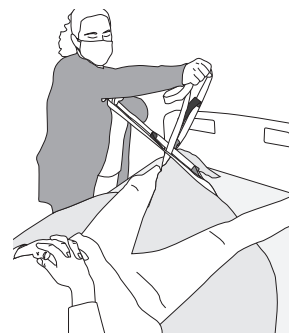


4. Pliez la toile PROS Sling entre les jambes du patient et placez les pieds de chaque côté de la toile PROS Sling. Passez une sangle d'élingue de l'extrémité du pied dans l'autre au niveau de la boucle la plus basse et la plus proche de l'appareil et fixez-la à la barre de suspension. Transférez le patient.

REMARQUE : Si possible, inclinez la chaise vers l'arrière et relevez le repose-pied. Les attaches Velcro peuvent être utilisées pour fixer l'élingue à la chaise.


MODE D'EMPLOI – TRANSFERT ASSIS DEPUIS LA CHAISE



1. Assurez-vous que la toile PROS Sling est correctement placée sous le patient avant de fixer la sangle.

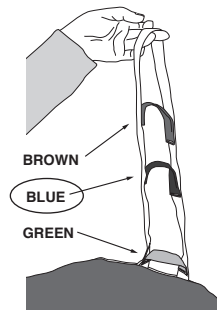

3. Attachez la sangle bleue de chaque côté de l'épaule. Assurez-vous de laisser suffisamment de jeu dans la barre de suspension pour attacher les sangles du pied sans faire glisser le patient hors de la chaise. Ignorez les élingues pour les hanches.

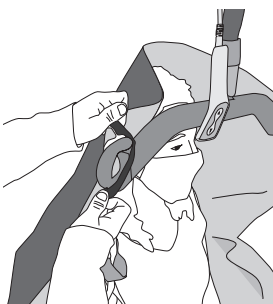

2. Fixez les sangles à la tête de la toile PROS Sling sur la barre de suspension. Pour une position assise totalement verticale, utilisez la poignée verte. Pour la position assise inclinée – utilisez la première sangle d'élingue (bleue) afin réduire la flexion de la hanche.



4. Pliez la toile PROS Sling entre les jambes du patient et placez les pieds de chaque côté de la toile PROS Sling. Passez une sangle d'élingue de l'extrémité du pied dans l'autre au niveau de la boucle la plus basse et la plus proche de l'appareil et fixez-la à la barre de suspension. Transférez le patient.

*Chaque PROS Sling comprend une alèse absorbante HoverCover. La PROS Sling doit être idéalement utilisée avec une alèse HoverCover ou un alèse absorbante ou un drap de lit approuvé par l'hôpital.

Nettoyage et maintenance préventive

NETTOYAGE DE PROS SLING

S'il est sali, le PROS Sling devrait être nettoyé avec des lingettes désinfectantes ou une solution de nettoyage utilisée par votre hôpital pour la désinfection de l'équipement médical. Une solution d'eau de javel 10:1 (10 volumes d'eau pour 1 volume d'eau de javel) peut également être utilisée.

NOTE : Le nettoyage avec une solution d'eau de javel peut décolorer le tissu.

Pour aider à garder le PROS Sling propre, HoverTech recommande l'utilisation de la housse absorbante jetable HoverCover™. Quel que soit le support sur lequel le patient est allongé pour garder le lit d'hôpital propre, il peut également être placé sur le PROS Sling.

Le PROS Sling monopatient n'est pas destiné à être blanchi.

L'HoverMatt PROS Sling possède une durée de vie de 30 jours dans des conditions normales d'utilisation. En cas de saleté importante, la PROS Sling doit être jetée et remplacée par une neuve.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Avant l'utilisation, une inspection visuelle devrait être effectuée sur le PROS Sling pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégâts visibles qui rendraient le PROS Sling inutilisable. Le PROS Sling doit disposer de toutes ses sangles et poignées (reportez-vous au manuel pour connaître toutes les pièces appropriées). Si des dégâts sont détectés et que le système ne fonctionne pas comme prévu, le PROS Sling ne doit plus être utilisé et doit être mis au rebut.

PRÉVENTION D'INFECTION

Le PROS Sling monopatient élimine la possibilité de contamination croisée et le besoin de blanchissage.

Si le PROS Sling est utilisé pour un patient isolé, l'hôpital devrait utiliser les mêmes protocoles/procédures qu'il utilise pour le matelas et/ou pour les draps dans la chambre du patient.

Retours et réparations

Tous les produits retournés à HoverTech doivent avoir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RGA) émis par l'entreprise. Veuillez appeler (800) 471-2776 et demander après un membre de l'équipe RGA qui vous délivrera un numéro RGA. Tout produit renvoyé sans numéro RGA entraînera un délai dans le temps de réparation.

Les produits retournés doivent être envoyés à :

HoverTech
à l'attention de : N° RGA _____
4482 Innovation Way
Allentown PA 18109

Pour les entreprises européennes, les produits doivent être renvoyés à :



À l'attention de : N° RGA _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Suède

Pour les garanties des produits, veuillez vous rendre sur notre site Web :

<https://hovertechinternational.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com

Ces produits sont conformes aux normes applicables aux produits de la classe 1 conformément au règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp Suède



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

En cas d'événement indésirable causé par le dispositif, les problèmes doivent être signalés à notre représentant autorisé. Notre représentant transmettra les informations au fabricant.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

1.800.471.2776
Fax 610.694.9601

HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com